


PROTECT[®] AND CARE

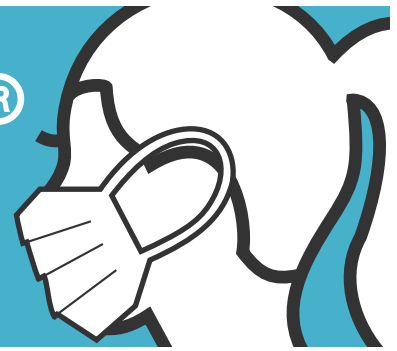

FICHE DE PRODUIT

Gants médicaux en nitrile jetables 5 g Non stérile

Réf. A00204

Spécifications

- A usage unique.
- Convient aux usages ARMPC et médicaux.
- Préviennent les risques d'infection et protègent contre les virus, bactéries et risques myco-fongiques.
- 100 % nitrile : plus résistant que les autres matériaux de gants tels que le latex, le caoutchouc naturel ou le vinyle.
- Sont flexibles et offrent une sensibilité tactile beaucoup plus grande que les gants de diagnostic standard.
- Bonne résistance à la perforation et à la déchirure
- Hypoallergénique: sans latex, sans poudre.
- Imperméable quandt utilisé dans un environnement de travail humide ou gras.
- Forme confortable:
 - avec bord roulé pour enfilage et retrait facile.
 - ambidextre.
- Bouts des doigts micro-structurés.
- Tailles:

	Longueur mm	Largeur main mm
S 6-7	240	80 +/-10
M 7-8	240	95 +/-10
L 8-9	240	110 +/-10
XL 9-10	240	+110 +/-5
- Indication claire de la taille en couleur
- Emballage & conditionnement pourvus de code QR.
- Notice en 27 langues: NL, FR, EN, DE, ES, IT, PT, BG, CS, DA, EL, FI, HU, HR, KK, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, SL, SR BS, SV, TR & UK



① min. 0.14 mm
② min. 0.09 mm
③ min. 0.07 mm
ÉPAISSEUR

Conditionnement

BOÎTE DISTRIBUTRICE 100 pièces/boîte 10 boîtes par carton = 1000 gants (500paires)

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018
TYPE B



GESCHIKT VOOR HACCP EN MEDISCHE DOELEINDEN
APPROPRIE POUR HACCP ET SOINS MEDICALES
SUITABLE FOR HACCP AND MEDICAL PURPOSES
FÜR HACCP UND MEDIZINISCHE ZWECKE GEEIGNET



In compliance with: MDR (EU) 2017/745 Class I
PPE Regulation (EU) 2016/425: Category III
EN ISO 21420:2020
EN 455-1-2020, EN 455-2-2015, EN 455-3-2015
ASTM D 6978, ASTM F 1671

EU Type Examination and Module C2 Notified Body 2777
SATRA TECHNOLOGY Europe Limited, Bracetown Business Park,
Clonree Dublin 15, D15 YN2P, Republic of Ireland

Test acc. to ASTM D 6978 - Test Chemotherapy

TEST CHEMOTHERAPY DRUG AND CONCENTRATION	MINIMUM BREAKTHROUGH DETECTION TIME (Specimen 1/2/3) (Minutes)
Carmustine (BCNU) 3.3 mg/ml (3,300 ppm)	14.7 (15.1/14.7/16.8)
Cisplatin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	240 min.
Cyclophosphamide (Cytoxan) 20 mg/ml (20,000 ppm)	240 min.
Cytarabine 100 mg/ml (100,000 ppm)	240 min.
Doxorubicin (IDC) 1.0 mg/ml (10,000 ppm)	240 min.
Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	240 min.
Etoposide (Toposar) 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	240 min.
Fluorouracil 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	240 min.
Isoflurane 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	240 min.
Methotrexate 25 mg/ml (25,000 ppm)	240 min.
Mitomycin C 0.5 mg/ml (500 ppm)	240 min.
Mitomycin 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	240 min.
Radiolabel (Ra-226) 6.0 mg/ml (6,000 ppm)	240 min.
Thiopyr 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	58.8 (110.0/58.8/67.0)
Vincristine Sulfate 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	240 min.

EN ISO
374-5

EN ISO
21420

EN
455
1+2+3



ISO 374-5:2016



TESTED IN ACCORDANCE TO:
EN ISO 374-5:2016 and EN ISO 374-4:2019
Degradation results indicate the charge in puncture resistance
of the gloves after exposure to the challenge chemical
PROTECTION AGAINST BACTERIA, VIRUSES & FUNGI: PASS

SPECIFICATION OF NITRILE DISPOSABLE GLOVES powder-free						
Size Spec		Small	Medium	Large	X-large	Tolerance
Total Length (mm)		240	240	240	240	min
Width of palm (mm)		85	95	105	115	± 5
Thickness (mm)	Finger	0.09	0.09	0.09	0.09	± 0.02
	Palm	0. 07	0.07	0.07	0.07	± 0.02
	Wrist	0.05	0.05	0.05	0.05	± 0.02
Weight per piece (gram)		3.0	3.5	3.9	4.3	± 0.3
T ensile-strength (≧)min		14Mpa	14Mpa	14Mpa	14MPa	min
Elongation (%)min	Before aging:	500	500	500	500	min
	After aging:	400	400	400	400	min