



## Onze pluspunten

- Met Panthenol en Allantoïne voor het wassen van patiënten
- Praktisch en snel in gebruik
- Magnetronbestendig
- Geschikt voor stomaverzorging en het reinigen van het stomagebied

## Gebruik en opmerkingen


Professionele reiniging van de huid, vooral voor immobiele patiënten

### Gebruik

Haal de doekjes uit de verpakking en wrijf over het te reinigen huidgedeelte. Gebruik voor elk huidgebied een nieuw doekje volgens het was-schema.

### Gebruiksaanwijzing

Indien nodig voor gebruik opwarmen in de magnetron (600 W-20 sec). De magnetrontijden kunnen variëren. Zorg ervoor dat de doeken niet te heet zijn voordat u ze gebruikt. Verwarm verpakkingen die al zijn geopend niet opnieuw. Doekjes zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

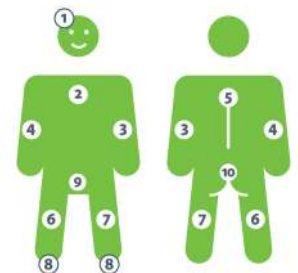

### Ingrediënten

AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PANTHENOL, ALLANTOIN, COCO-GLUCOSIDE, CO-CAMIDOPROPYL BETAINE, ETHYLEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, PARFUM.

## Verpakking Aantal

Afmetingen 10\*30cm

10 doekjes per polybag  
24 polybags/ Masterbox