


PRODUCTFICHE

Medische nitril handschoenen lange manchet 7g Non steriel

Specificaties

- Voor éénmalig gebruik
- Geschikt voor HACCP en medische doeleinden
- Medisch & beschermend: voorkomen besmettingsgevaar en beschermen tegen virussen, bacteriën & fungi
- Langer manchet 300mm voor extra veiligheid. Zijn 6 cm langer dan standaard handschoenen. De manchet biedt een groot beschermingsgebied, omdat deze niet alleen de arm bedekt, maar ook een deel van de onderarm.
- 100% Nitril - Treksterkte: 9N, sterker dan andere handschoenmaterialen zoals latex, natuur rubber of vinyl.
- Zijn flexibel en bieden een veel grotere tastgevoeligheid dan standaard diagnostische handschoenen.
- Goede punctie- en scheurbestendigheid
- Hypo allergen: - Latexvrij
- Poedervrij: minder kans op irritatie.
- Ondoorlatend bij gebruik in natte of vette werkomgeving
- Comfortabele pasvorm:
 - voorzien van rolrand voor makkelijk aan- en uittrekken
 - zowel links als rechts te dragen
- Microgestructureerde vingertoppen

Maten:	Lengte mm	Palmbreedte mm
S 6-7	300	80 +/-10
M 7-8	300	95 +/-10
L 8-9	300	110 +/-10
XL 9-10	300	+110 +/-10

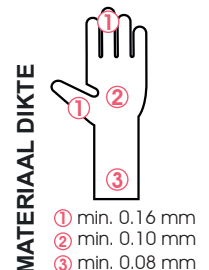

- **Opslag:** Op een koele, droge plaats tussen 2°C en 40°C
- **Houdbaarheid:** 5 jaar



Speciale button voor eenvoudig openen

Verpakking kwantiteit



Duidelijke maataanduiding met kleur

Verpakking voorzien van barcode en QR code

Info in 27 talen: NL, FR, EN, DE, ES, IT, PT,...

	Dispenserbox	Masterbox	Pallet
Aantal	100	1000	60 MB
Afmetingen	280*120*75mm	390*290*250mm	1.2*0.8*1.85mt
Gewicht	770g	7.7kg	462kg

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018
TYPE B



GESCHIKT VOOR HACCP EN MEDISCHE DOELEINDEN
APPROPRIE POUR HACCP ET SOINS MEDICALES
SUITABLE FOR HACCP AND MEDICAL PURPOSES
FÜR HACCP UND MEDIZINISCHE ZWECKE GEEIGNET

Res AP (2004)4
Regulation (EU) 10/2011
Ref. EN 1186: Part 2, Part 3
& Part 14 incl. Olive oil



Letter	Chemical	CAS	Permeation Level EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B	Degradation Level EN ISO 374-4:2019
K	40% Sodium Hydroxide	1310-73-2	6	14.9%
P	30% Hydrogen Peroxide	7722-84-1	3	31.6%
T	37% Formaldehyde	50-00-0	4	13.0%

Permeation Performance Level
Measured breakthrough
time (minutes)

	1	2	3	4	5	6
	>10	>30	>60	>120	>240	>480

In compliance with: MDR (EU) 2017/745 Class I
PPE Regulation (EU) 2016/425: Category III
EN ISO 21420:2020 ISO 16523
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
ASTM D 6978, ASTM F 1671

EU Type Examination and Module C2 Notified Body 2777
SATRA TECHNOLOGY Europe Limited, Bracetown Business Park,
Clonee Dublin 15, D15 YN2P, Republic of Ireland

Test acc. to ASTM D 6978 - Test Chemotherapy

TEST CHEMOTHERAPY DRUG AND CONCENTRATION	MINIMUM BREAKTHROUGH DETECTION TIME (Specimen 1/20) (Minutes)
Carmustine (BCNU) 3.3 mg/ml (3,300 ppm)	240 min.
Cisplatin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	240 min.
Cyclophosphamide (Cytoxin) 20 mg/ml (20,000 ppm)	240 min.
Cytarabine 100 mg/ml (100,000 ppm)	240 min.
Doxorubicin (DUC) 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	240 min.
Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	240 min.
Etoposide (Etoposin) 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	240 min.
Fluorouracil 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	240 min.
Hydrocortisone 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	240 min.
Meclizine 20 mg/ml (20,000 ppm)	240 min.
Mitomycin C 0.5 mg/ml (500 ppm)	240 min.
Mitomycin 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	240 min.
Paclitaxel (Taxol) 6.0 mg/ml (6,000 ppm)	240 min.
Thioplep 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	74.9 (74.9/56.7/79.0)
Vincristine Sulfate 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	240 min.

Tested in accordance with: EN ISO 374-5:2016 and EN ISO 374-4:2019
Degradation results indicate the charge in puncture resistance
of the gloves after exposure to the challenge chemical
PROTECTION AGAINST BACTERIA, VIRUSES & FUNGI- PASS

